


DATA SHEET

FRÍO POMP ETUI

EAN 5039345000647 – Z INDEX 15965163

FRÍO Tas heeft één ruimte aan de binnenzijde, geen onderverdeling

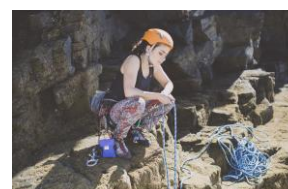

FRÍO houdt insuline veilig – ook voor adrenaline en andere medicatie die een bepaalde tolerantietijd bij kamertemperatuur heeft. Het POMP ETUI komt MET een Nylon Binnentas die uw Pomp tegen vocht beschermt. Ook gebruikt voor CoaguChek Teststrippen.

Afmeting binnentas: 14 x 9½ cm

Afmeting buitentas 16½ x 10½ cm

Hier passen de meeste kleine pompen in,
ook CoaguChek teststrippen.

Binnentas is Poly-Cotton

Buitentas is Cambrelle®

Deze FRÍO Nylon Binnentas bevelen we aan te gebruiken als u een metalen – of digitale spullen in de FRÍO wilt doen.

Deze beschermt tegen vocht en is voor alle FRÍO modellen te verkrijgen



Zwart 15965171



Rood 15965198




Lila 15965074



Groen 15965082



Burgundy 15965201

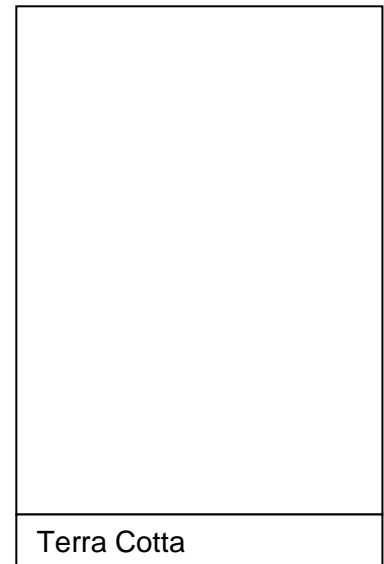

Terra Cotta

FRIO biedt een effectieve, goedkope oplossing aan voor het probleem om insuline op een veilige temperatuur te houden, zonder het gebruik van een koelkast of koelementen!

Het principe is simpel: De FRIO wordt geactiveerd door onderdompeling in water. De kristallen in de wand zwellen op tot een gel.

Nu plaatst u uw insuline uit de koelkast in de FRIO en door een langzaam verdampingsproces wordt de lage temperatuur voor lange tijd aangehouden en blijft uw insuline veilig.

De FRIO is een uitstekende oplossing voor het reizen met INSULINE IN GEBRUIK,

dwz u moet deze insuline binnen 4 tot 6 weken gebruiken afhankelijk van het type insuline.

Dus NIET voor opslag of voorraad insuline: die moet ALTIJD in de koelkast

**Alle modellen hebben 1 ruimte, GEEN onderverdeling aan de binnenzijde !
veel verschillende modellen in veel kleuren.....**

-- HOUDT INSULINE DAGENLANG OP VEILIGE TEMPERATUUR --

-- HEEFT GEEN KOELEMEMENTEN OF ELEKTRICITEIT NODIG --

-- IS KEER OP KEER TE GEBRUIKEN --