


## Een nieuwe testcassette in de meter plaatsen wanneer de 50 testen opgebruikt zijn



Schuif het afdekkapje zo ver mogelijk open.



Druk de ontgrendelingsknop voor het deksel van het cassettecompartiment naar boven.

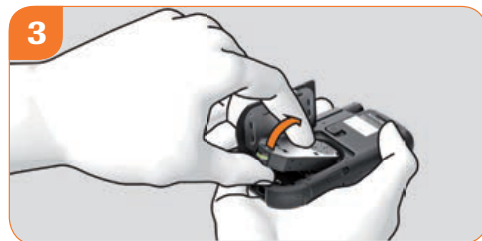

Haal de gebruikte testcassette uit de meter.



Plaats de nieuwe testcassette in de meter. Sluit het deksel van het cassettecompartiment en het afdekkapje van het testveld.

## Een nieuwe lancettenhouder plaatsen wanneer de 6 lancetten gebruikt zijn



Verwijder het dopje en de gebruikte lancettenhouder.



Schuif een nieuwe lancettenhouder, met het witte uiteinde eerst, in de prikker en plaats het dopje terug.



Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte op de markering staat. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.



Zet een nieuw lancet klaar voor gebruik door het hendeltje in richting ① te duwen en vervolgens weer in richting ②.

# Stripvrij, eenvoudig, slim.



4 eenvoudige stappen  
om je bloedglucose te meten.




## 4 eenvoudige stappen om een meting uit te voeren



1 Schuif het afdekkapje open. De meter wordt automatisch aangezet.



2 Prik met het lancet in je vinger, zodat er een bloeddruppel verschijnt.

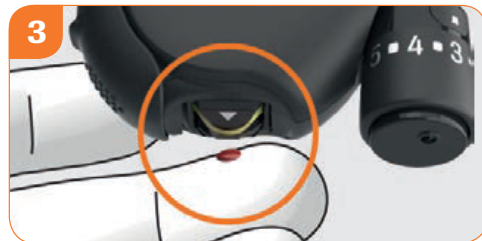

3 Breng de bloeddruppel aan op het testveld.




4 Lees het resultaat af en schuif het afdekkapje toe. De meter wordt uitgeschakeld.

## 4 basisregels voor een correcte meting




1 **Was je handen** met warm water en zeep, spoel ze zorgvuldig af en droog ze grondig af met een propere handdoek.

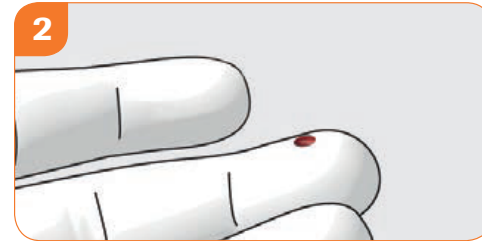

2 Gebruik altijd een kleine, **goed gevormde** bloeddruppel. Laat de druppel niet uitlopen.



3 Breng de bloeddruppel voorzichtig en met vaste hand, **in het midden** van het testveld aan. Druk het testveld niet op je vinger.

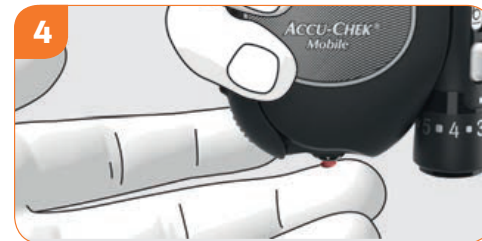

4 **Breng de bloeddruppel onmiddellijk aan.** Haal je vinger weg zodra het bericht 'Meting loopt' weergegeven wordt op het scherm en je een geluidssignaal hoort (indien ingesteld).

Alleen bij een foutloze uitvoering van de meting zijn de resultaten correct en kunnen juiste aanbevelingen worden gedaan voor de behandeling. Volg deze instructies daarom nauwlettend.

## Onze Accu-Chek® Service medewerkers staan voor je klaar!



Wij blijven tot je beschikking voor meer informatie over de Accu-Chek® producten en diensten.

- Het gebruik
- Algemene productinformatie
- Antwoord op je vragen

Je kan ons bereiken via het gratis nummer 0800 93 626, van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 18u00. Het is eenvoudig en snel.

Surf naar [www.youtube.com/AccuCheckBelgium](http://www.youtube.com/AccuCheckBelgium) en bekijk de Accu-Chek Mobile training video's.

### Ontdek wat mogelijk is.

[www.accu-chek.be](http://www.accu-chek.be)

[www.facebook.com/accuchekbe](https://www.facebook.com/accuchekbe)

0800 93 626

[www.youtube.com/AccuCheckBelgium](https://www.youtube.com/AccuCheckBelgium)

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2015 Roche Diagnostics



Roche Diagnostics Belgium NV/SA  
Schaarbeeklei 198  
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®