


Jouw vingertoppen zullen je dankbaar zijn

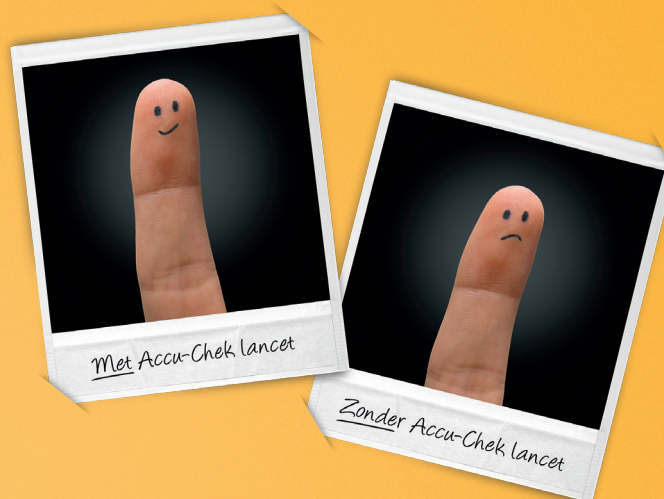

Knop om de prikpen aan te spannen



Ontspanknop

Keuze van de prikdiepte

De dop en de opening voor het nieuwe lancet





## Wel een druppeltje bloed, maar nagenoeg pijnloos



**1**  
Trek het dopje van de prikpen



**2**  
Plaats een nieuw lancet tot de aanslag in de lancethouder

Bij het plaatsen van het lancet dient u een "klik" te horen. Draai het beschermingskapje van het lancet af



**3**  
Plaats het dopje weer op de prikpen. Hierbij moeten het gleufje in het dopje en de lijn voor weergave van de ingestelde prikdiepte op de prikpen op één lijn liggen. Bij het plaatsen van het dopje dient u een "klik" te horen. Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte ingesteld is. Instellen van de prikdiepte



**4**  
Prikpen aanspannen  
De ontspanknop is nu geel gekleurd.



**5**  
Bloed prikken  
Zet de prikpen tegen je vinger en druk op de gele ontspanknop.




**6**  
Lancet uitwerpen  
Haal de voorste dop van de prikpen. Door het uitwerpmechanisme naar voren te schuiven valt het gebruikte lancet eruit.

## Clixmotion® technologie voor nagenoeg pijnloos prikken



### De conventionele technologie

- Trillingen veroorzaken pijnlijke huidbeschadiging.
- Lancet stopt brusk en veert terug.

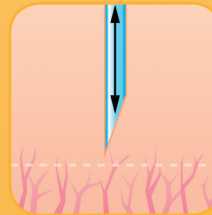

### Clixmotion garandeert een onvergelykbare zachtheid

#### De Clixmotion technologie

- Geen trillingen. Noch in, Noch uit.
- Lancet wordt zacht afgeremd en onmiddellijk teruggetrokken.



[www.accu-chek.be](http://www.accu-chek.be)



[www.facebook.com/accuchekebe](https://www.facebook.com/accuchekebe)



0800 93 626



[www.youtube.com/AccuChekBelgium](https://www.youtube.com/AccuChekBelgium)