



# Meten in alle eenvoud.

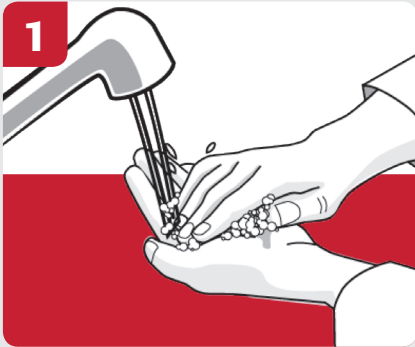


**1** Was uw handen en droog ze goed af, voordat u een bloedglucosemeting uitvoert.

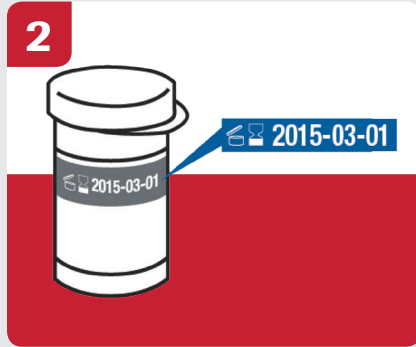


**2** Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen teststrips waarvan de vervaldatum is overschreden.



**3** Neem een teststrip uit de flacon teststrips. Sluit de flacon direct hierna weer goed af met de dop.

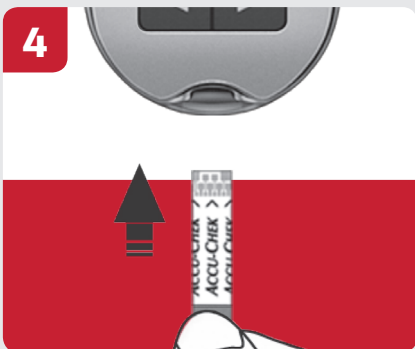

**4** Voer de teststrip in de richting van de pijlen in de meter tot de meter een akoestisch signaal geeft.

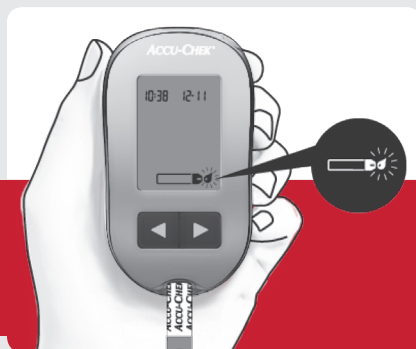


Er verschijnt een knipperend bloeddruppelsymbool op de display.




**5** Houd de Accu-Chek® Softclix prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de gele prikknop om in uw vinger te prikken.



**6** Houd het uiteinde van de teststrip tegen de bloeddruppel. Breng geen bloed aan op de bovenkant van de teststrip.

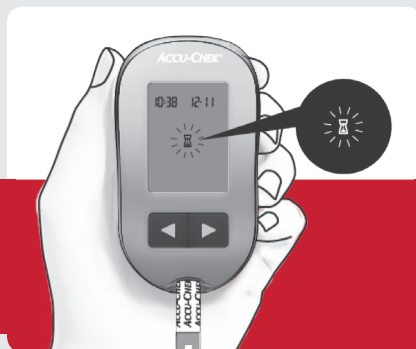

De meter geeft een akoestisch signaal en knippert, als er voldoende bloed in de teststrip is opgezogen.

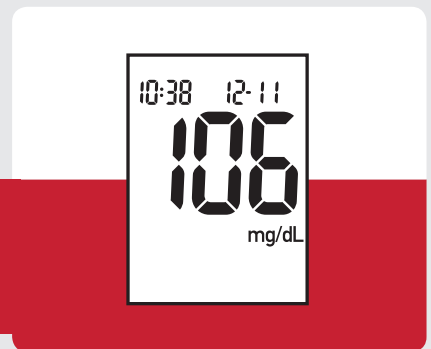

Het meetresultaat verschijnt na 5 seconden op de display.